

Perfect Nose



1. Περιστρέψτε τα gel pads ώστε οι μικρές ακίδες να βρεθούν στην εσωτερική πλευρά.
2. Εφαρμόστε την συσκευή στην μύτη όπως στην φωτογραφία, για 10 έως 15 λεπτά ημερησίως.
3. Εφόσον έχετε προμηθευτεί το μοντέλο με 2 μεγέθη ακίδων, μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, μπορείτε να περιστρέψετε τις ακίδες στην μεγαλύτερη πλευρά τους και να ενισχύσετε την δράση της συσκευής.
4. Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε μορφής δυσφορία σταματήστε την χρήση της συσκευής.
5. Αν πάσχετε από οποιαδήποτε ασθένεια του αναπνευστικού, συμβουλευτείτε τον γιατρό πριν την χρήση της
6. Η χρήση της συσκευής είναι απολύτως ασφαλής και ανώδυνη.
7. Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά.

Για λόγους υγιεινής το προϊόν δεν επιστρέφεται και δεν αντικαθίσταται αφότου χρησιμοποιηθεί.